



Anleitung zur Probenentnahme mit Trockentupfer beim Verdacht auf SARS-CoV-2

1

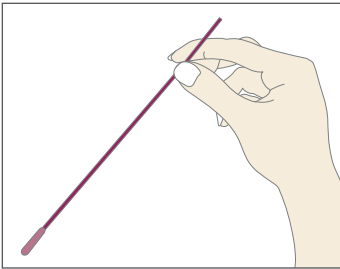


Den Tupfer aus steriler Verpackung entnehmen.

2

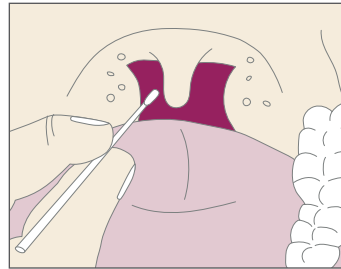


Probe im hinteren Rachenraum durch leichtes Rotieren mit der Tupferspitze entnehmen.

3

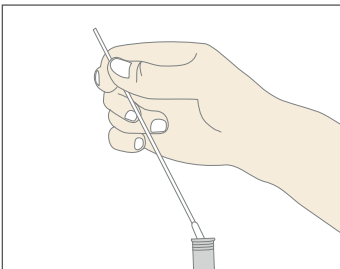


Röhrchenkappe abschrauben und den Tupfer bis zum Röhrchenboden bzw. der Sollbruchstelle des Tupferstiels eingeben.

4

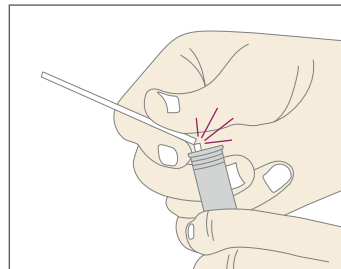


Tupferstiel vorsichtig an der Sollbruchstelle abbrechen.

5

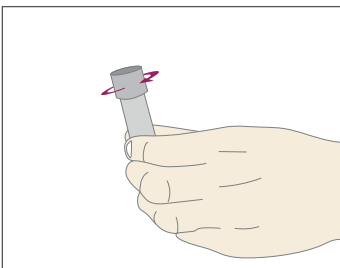


Röhrchenkappe wieder auf das Röhrchen setzen und fest zuschrauben.

6

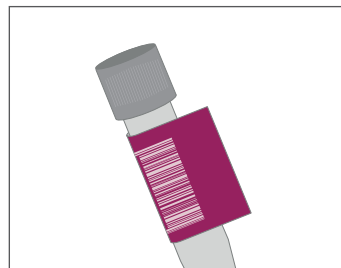

Röhrchen mit Barcodeetikett oder Patientendaten versehen.

7

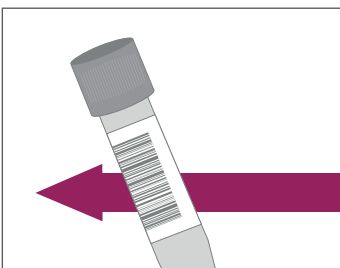

Röhrchen sofort an das Labor senden. Nach Möglichkeit die Probe bis zur Abholung gekühlt lagern.